



個人防護具

不織布マスク

#7042

ガードファイン3層マスク 50枚入

GUARDFINE 3PLY MASK



50枚入

フリーサイズ

ホワイト
ブルー
ピンク

BFE
99%以上

PFE
99%以上

VFE
99%以上

JIS T9001医療用マスク
クラスII適合番号
M22410001

3層構造の優れたフィルター機能で、
ほこり、花粉、ウィルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。



 川西工業株式会社

商品特長

1 高密度不織布フィルター

ほこり、花粉、ウイルス・細菌の進入や飛散を防ぎます。
(BFE・PFE・VFE99%以上)

2 耳ゴム


長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴムを
耳ゴムに採用しています

3 性能

日本産業規格JIS T9001の医療用マスククラスⅡに
適合するマスクです。

4 鼻にしっかりフィットするノーズピース

曲げて時間が経過しても戻りにくいノーズピース。
鼻にしっかりフィットし、隙間から細菌・微粒子が侵入する
ことを防ぎます。

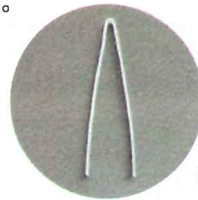

※曲げて1日経過したノーズピース

商品情報

脱着手順

【ブリーツ式マスク】【着け方】

①



ブリーツを下向きにして、
顔に当てる

②



ノーズピースを抑えて、
鼻の形に合わせる

③




ブリーツを顎まで伸ばす

【ブリーツ式マスク】【外し方】



表面に触れないように、耳ゴムを掴んで外します

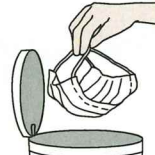

医療用マスク条件(JIS T9001)

特性	試験内容	クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
PFE: 微小粒子捕集効率(%)	約0.1 μmの微粒子が濾過された率	≥ 95	≥ 98	≥ 98
BFE: バクテリア飛沫捕集効率(%)	約3.0 μmの細菌を含む粒子が濾過された率	≥ 95	≥ 98	≥ 98
VFE: ウイルス飛沫捕集効率(%)	約0.1~5.0 μmの微粒子が濾過された率	≥ 95	≥ 98	≥ 98
可燃性	炎の広がりにくさ	区分1	区分1	区分1
血液バリア性(kPa)	液体(血液)が飛散した場合、どの程度の圧力にまで耐えるか	10.6	16.0	21.3
安全衛生・通気性	※1	○	○	○

※「①圧力損失試験60Pa/cm³未満、②遊離ホルムアルデヒド試験75 μg/g以下、③蛍光試験(著しい蛍光を認めない)」の3項目をまとめて表記しております。

商品規格

品番	品名	サイズ	ケース入数	カラー	JANコード	性能
#7042	ガードファイン3層マスク 50枚入	フリー	50枚×40箱	ホワイト	4906554172018	・BFE: 99%以上 ・PFE: 99%以上 ・VFE: 99%以上 ・血液バリア性: ○ ・可燃性: 区分1 ・安全衛生・通気性: ○
				ブルー	4906554172261	
				ピンク	4906554172278	

◆素材: 不織布/ポリプロピレン
ノーズピース/ポリエチレン
耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン

◆生産国: 中国

川西工業株式会社

〒503-0011 岐阜県大垣市曾根町 2-195
TEL (0584)77-7997 FAX (0584)77-7996
<http://www.kawanishi-kk.co.jp>

川西工業HP

