



個人防護具


N95マスク

#7067

DS2/N95 使い捨て折りたたみ式防じんマスク 20枚入（個包装）

N95 MASK

N95

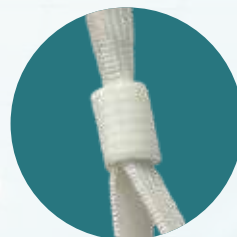

アジャスターで
ゴムバンドの長さ調節可能



やわらかいノーズパッドで
肌に優しく、フィット感抜群



1枚ごとの個包装で衛生的



商品規格

品番	商品名	カラー	サイズ	ケース入数	JANコード
#7067	DS2/N95 使い捨て折りたたみ式防じんマスク 20枚入（個包装）	ホワイト	約156×110cm （折りたたんだ状態）	20枚×12箱	4906554170977

【素材】 面体：ポリプロピレン、ポリエステル
ノーズピース：ポリエチレン
ノーズパッド：ポリウレタン
ゴムバンド：ポリエステル、ポリウレタン
アジャスター：シリコーン

【製造国】中国

商品特長

- NIOSH(米国労働安全衛生研究所)のN95規格を取得
- 国家検定区分DS2を取得(国家検定番号：第TM842号)
- 粒子捕集効率95%以上
- 1枚ごとに個包装になっており、衛生的に使用できる
- やわらかいノーズパッドで肌に優しく、フィット感抜群




性能


試験項目	6001-DS2	唇の幅(cm)	鼻根おとがい距離(cm)	漏れ率(%)
粒子捕集効率	95.0%以上	3.5~4.5	10.5~11.5	3.49
吸気抵抗値	50Pa以下		11.5~12.5	2.58
排気抵抗値	50Pa以下		12.5~13.5	3.75
吸気抵抗上昇値	160Pa以下	4.5~5.5	10.5~11.5	1.31
ぬれ抵抗値	49Pa以下		11.5~12.5	0.65
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下		12.5~13.5	0.59
重量	20g以下	5.5~6.5	13.5~14.5	0.43
使用限度時間	14時間		11.5~12.5	2.57
			12.5~13.5	1.60
			13.5~14.5	0.52

区分:DS2


着脱手順

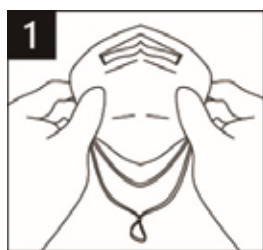

図のようにノーズピースが前にくるようにゴムバンドが下に垂れるように持ちます。

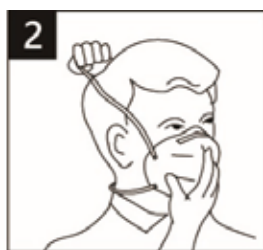


片手でマスクを押さえながら下のゴムを首のまわりにつけ、次に上のゴムを頭上後頭部につけて下さい。

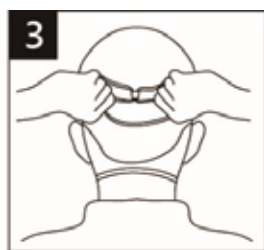


アジャスターを使って、上のゴムの長さを調節します。



両手の指でノーズパッドが鼻に密着するように軽く押しします。

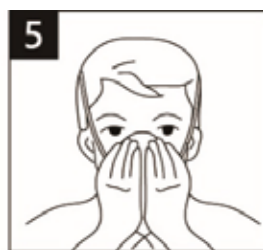

両手でマスク全体を覆い、息を吐き空気の漏れをチェックして密着のいい場所にマスクを合わせます。

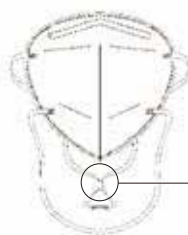

*アジャスターを取り外さないで下さい。
*着用前にアジャスターを引き出して、ゴムバンドを緩めます。

注意：
マスクは着用の都度しっかりとフィットしていることを確認しなければなりません。両手をマスクの上しっかりと置き、息を吐き出します。鼻または周辺から空気が漏れる場合は、マスクがしっかりとフィットするまでノーズパッドとゴムバンドを調整します。

